

FreeStyle Libre

SYSTEM MONITOROWANIA GLIKEMII FLASH



JESZCZE WIĘKSZA DOKŁADNOŚĆ TAKŻE, NA TWOIM CZYTNIKU FREESTYLE LIBRE



CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY ZAKTUALIZOWAĆ CZYTNIK?

Wejdź na stronę www.freestylelibre.com/update i postępuj zgodnie z instrukcją.



KIEDY POWINIENEM ZAKTUALIZOWAĆ SWÓJ CZYTNIK?

Dokonaj aktualizacji czytnika przed uruchomieniem nowego sensora FreeStyle Libre. Jeśli zaktualizujesz czytnik w trakcie noszenia aktywnego sensora, utracisz możliwość skanowania czytnikiem FreeStyle Libre.

Natomiast będziesz mógł nadal skanować aktywny sensor za pomocą aplikacji FreeStyle LibreLink.



CO JEŚLI OBECNIE UŻYWAM OBU URZĄDZEŃ: CZYTNIKA FREESTYLE LIBRE I APLIKACJI FREESTYLE LIBRELINK?

Zaktualizuj oba urządzenia, aby otrzymywać takie same odczyty glikemii z jeszcze większą dokładnością.



life. to the fullest.®

Abbott

FreeStyle Libre

SYSTEM MONITOROWANIA GLIKEMII FLASH



WAŻNE: NIE aktualizuj czytnika, jeśli masz założony i aktywny sensor. Po aktualizacji czytnika NIE będzie możliwe jego dalsze skanowanie.

1 ZAPLANUJ

Wejdź na stronę www.freestylelibre.com/update i przeprowadź aktualizację czytnika.

2 PRZYGOTUJ SIĘ

Podepnij komputer do gniazdka sieciowego



Podłącz do niego czytnik żółtym kablem USB.

3 POBIERZ

Pobierz ze strony oprogramowanie niezbędne do aktualizacji czytnika.

4 ZAKTUALIZUJ

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby rozpocząć aktualizację czytnika. Aktualizacja może zająć kilka minut.



3-4 min

ADC-14351

FreeStyle Libre i powiązane nazwy handlowe są znakami towarowymi firmy Abbott Diabetes Care, Inc., w różnych krajach.



life. to the fullest.®

Abbott